

ZOLL AED 3[®] 簡易取扱説明書 ご使用のポイント

AsahiKASEI
旭化成ゾールメディカル

※本書は必ずAEDと共に保管してください

POINT1 成人/小児* 兼用パッド

*小児とは未就学児を指します


1 緑のパッドと紫のセンサーを保護紙からはがす



3 青のパッドを保護紙からはがして貼る




2 センサーで位置決め

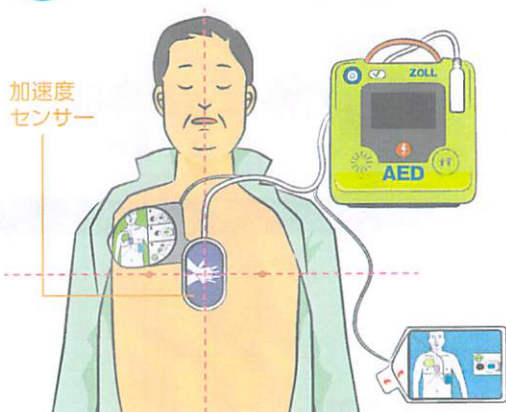

紫の加速度センサーが胸の真ん中(胸骨の下半分)に位置するようにし、加速度センサーと緑のパッドを貼る。

小児*の場合

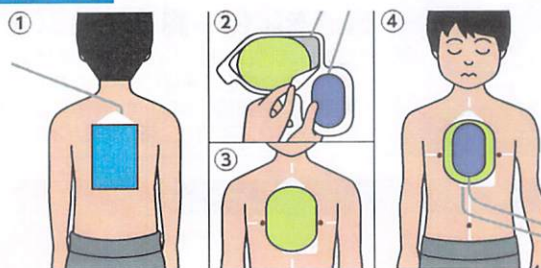

- ① 青のパッドを保護紙からはがし、背中に貼る
- ② 緑のパッドと紫の加速度センサーを切れ込みにそって切り離す
- ③ 緑のパッドを保護紙からはがし、胸の真ん中に貼る
- ④ 紫の加速度センサーを保護紙からはがし、緑のパッドの上に貼る

POINT2 胸骨圧迫ヘルプ機能

ガイドライン
2015対応

ZOLL AED 3[®]は耳が不自由な方にもご使用いただけます

1 胸骨圧迫深度インジケーター



救助者の実際の胸骨圧迫の深さを棒グラフでリアルタイムに表示します。圧迫が適切な深さ(5~6cm)であるかがひと目でわかります。

2 胸骨圧迫リズム音

105回/分のメトロノーム音で、適切な胸骨圧迫テンポ(100~120回/分)に誘導します。



3 イラスト・メッセージ表示、音声案内



カラーイラストに加え「もっと強く押ししてください」「胸骨圧迫は有効です」などの音声案内とメッセージ表示で、適切な胸骨圧迫をサポートします。

⚠ ZOLL AED 3[®] 使用時の注意点

- 小児モードでご使用の場合は、成人/小児切替ボタンを押し、切替ボタンが緑色に光っていることを確認してください。
- 小児モードでご使用の場合、胸骨圧迫の深さは測定されず、棒グラフも表示されません。なお、小児蘇生の胸骨圧迫の適切な深さは胸の厚みの1/3です。

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル
tel.03-6205-4544 fax.03-6205-4923

旭化成AEDコールセンター(24時間受付)

☎0800-222-0889



一般的名称: 非医療従事者向け自動除細動器
販売名: ZOLL AED 3 自動体外式除細動器
医療機器承認番号: 30100BZ100003000
クラス分類: 高度管理医療機器(クラスⅢ)/特定保守管理医療機器